

# NÁVOD K POUŽITÍ



## skříňka pro AED OZ D804

Před instalací skříňky si pozorně přečtěte návod a potom postupujte dle instrukcí. Na poškození způsobené nedodržením návodu se záruka nevztahuje.

skříňka slouží pouze k uložení AED, nikoliv ke kontrole funkčnosti AED.

### BEZPEČNOST

Nikdy neinstalujte skříňku na přímé slunce. skříňka by měla být instalována do prostorů s teplotou od 0 °C do 40 °C.

Pro vyvarování se rizika vzplanutí nebo zasažení elektrickým proudem by skříňka neměla být vystavena otevřenému ohni.

Po instalaci skříňky by měl být kolem volný prostor minimálně 13 cm, aby byla zajištěna správná ventilace vzduchu.

Udržujte skříňku v bezpečné vzdálenosti od radiátorů a jiných zdrojů tepla. Neumísťujte skříňku v blízkosti jakýchkoli zařízení generujících teplo. Neumísťujte cokoli pod nainstalovanou skříňku.

Aby nedošlo k poničení skříňky, neumísťujte předměty do otevírací mechaniky skříňky.

skříňka by neměla být umístěna v mokřém prostředí, ani by neměla být vystavena vysoké vlhkosti.

Upevňovací materiál musí být přizpůsobený povrchu, na který je skříňka instalována.

Výrobce ani distributor nejsou zodpovědní za špatnou instalaci, nehodu nebo zranění během instalace skříňky.

## ZÁRUKA

Rozmontovávání skříňky je zakázáno.

Aby nedošlo k poničení skříňky, neumísťujte předměty do otevírací mechaniky skříňky.

Opravy skříňky může provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Na poškození způsobené nedodržením návodu se záruka nevztahuje.

Jakákoli manipulace či montáž kromě těch uvedených v návodu jsou zakázány a nevztahuje se na ně záruka.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

skříňku ani obal nevyhazujte do směsného odpadu. Likvidace by měla proběhnout v místech k tomu určených.


skříňka je vybavena bateriemi, jejichž technické parametry splňují Evropské směrnice 2006/66/CE a 2008/103/CE. Použité baterie nelikvidujte spolu se směsným odpadem, ale použijte místa k tomu určená.

## UPOZORNĚNÍ

V balení se skříňkou jsou obsaženy baterie. V případě použití jiných baterií než doporučených výrobcem hrozí nebezpečí výbuchu.

Opravy a údržbu skříňky včetně výměny baterií, může provádět jen způsobilá osoba.

## INSTALACE

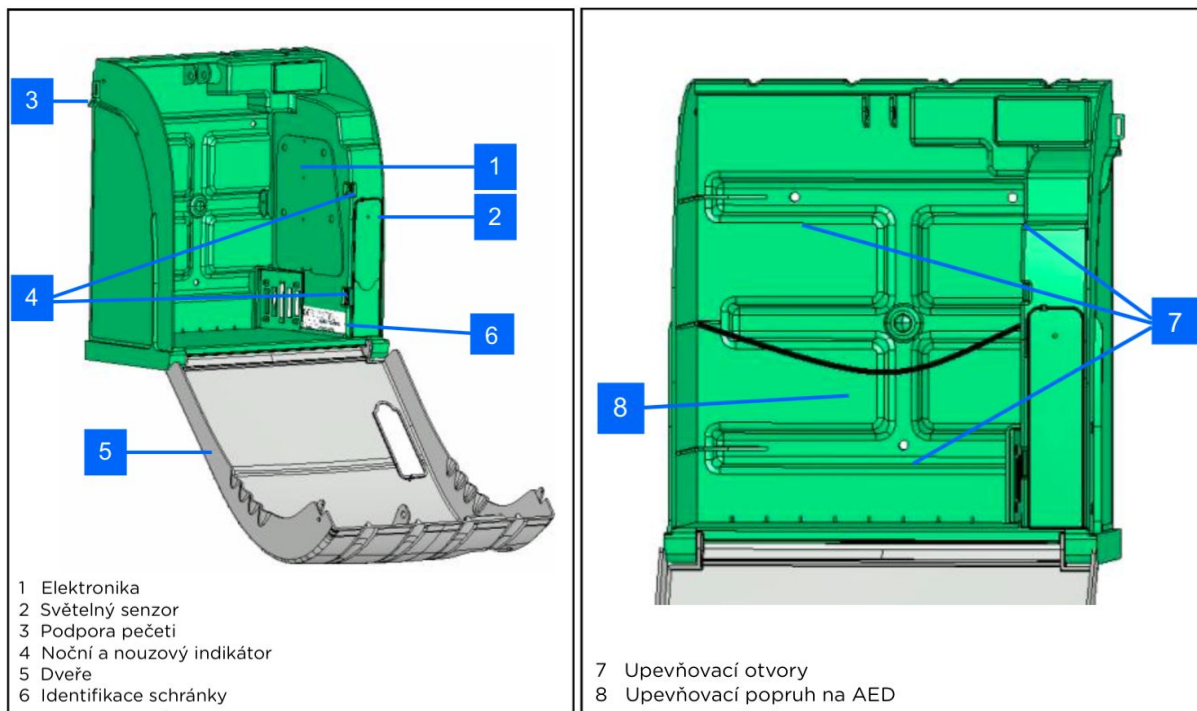

## Identifikační štítek




V případě nutnosti kontaktovat výrobce nebo distributora se ujistěte, že máte k dispozici sériové číslo skříňky.

## Počáteční otevření skříňky

Před instalací skříňky na stěnu použijte malý šroubovák k jejímu otevření.

Vsuňte šroubovák mezi dveře skříňky a její tělo.

Otevřete dveře. Pozor, abyste nepoškodili skříňku.

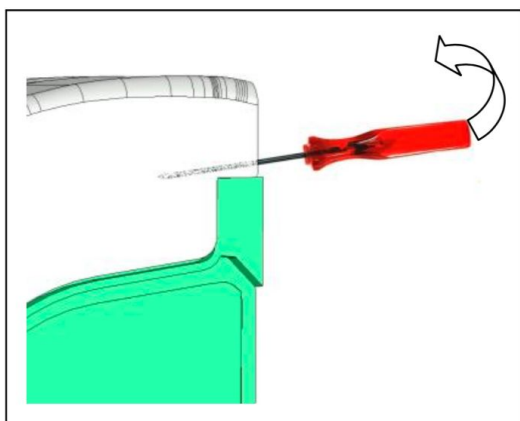

Opakujte stejné kroky na druhé straně skříňky.

## Instalace skříňky

Nikdy neinstalujte skříňku na přímé slunce. skříňka musí být instalována ve vnitřních prostorech v souladu s instrukcemi výrobce defibrilátoru.


Instalace musí být prováděna způsobilou osobou.

Pokud je skříňka instalována na veřejných místech nebo místech volně dostupných, instalujte ji na pevný podklad nebo sloup. Pamatujte, že instalace musí být v souladu s příslušnými místními zákonnými předpisy, zákony a normami.


Upevňovací materiál musí být vhodně vybrán dle typu povrchu, na který je skříňka instalována.

Zachovejte manipulační prostor v souladu s níže uvedeným schématem.


Přesné rozměry skříňky jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu v sekci Specifikace.

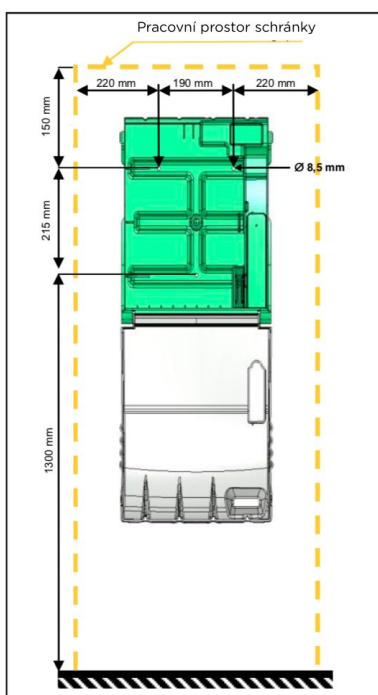


Před skříňkou ponechte volný prostor 140 cm pro snadné otevření dvířek.

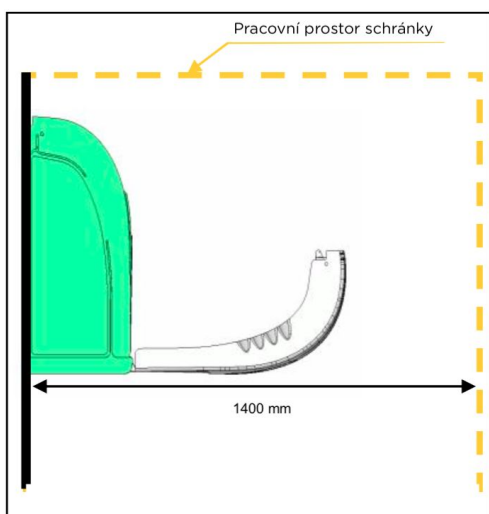

K označení otvorů pro montáž na stěnu použijte šablonu na předvrtání, která je připojena v balení.

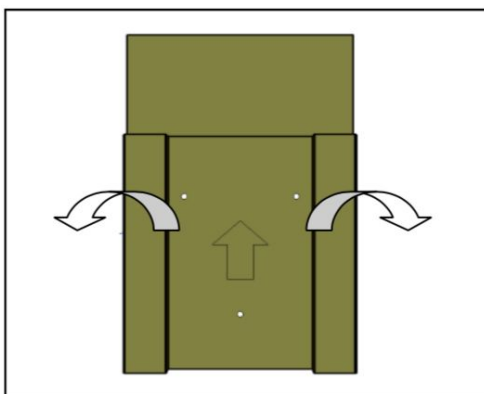


Položte šablonu na stěnu tak, aby šipka na šabloně byla viditelná a směrem nahoru.

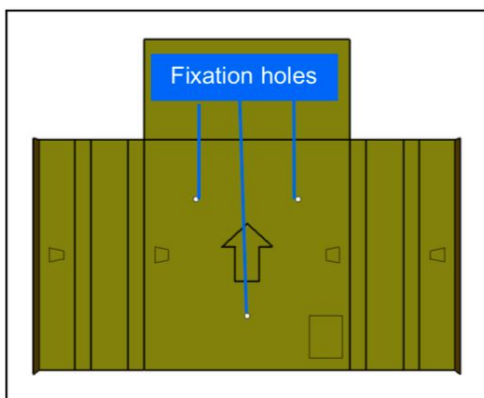

Vzhledem k podkladu použijte odpovídající metodu přimontování.


Montážní metoda i materiál by měly udržet váhu 20 kg.

Příklad instalace:

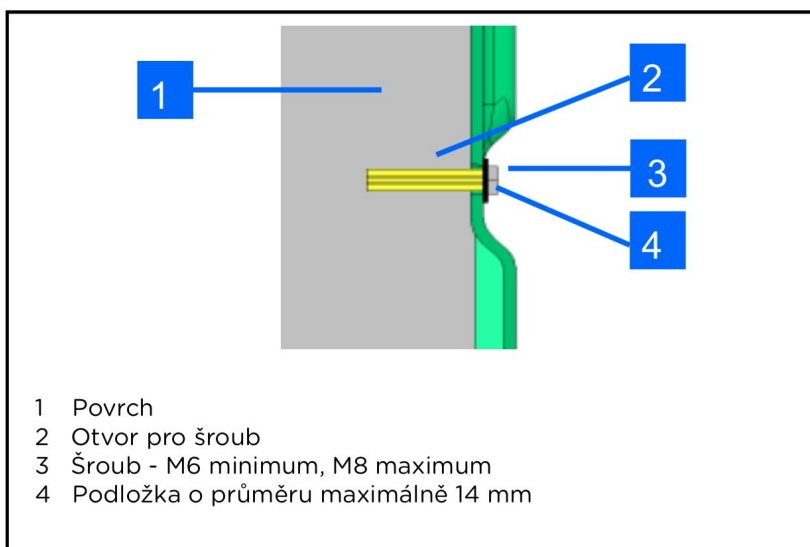


Tloušťka hlavy šroubu a podložky by neměly překročit 8 mm. Použijte 3 otvory k upevnění skříňky.

## Vložení baterií

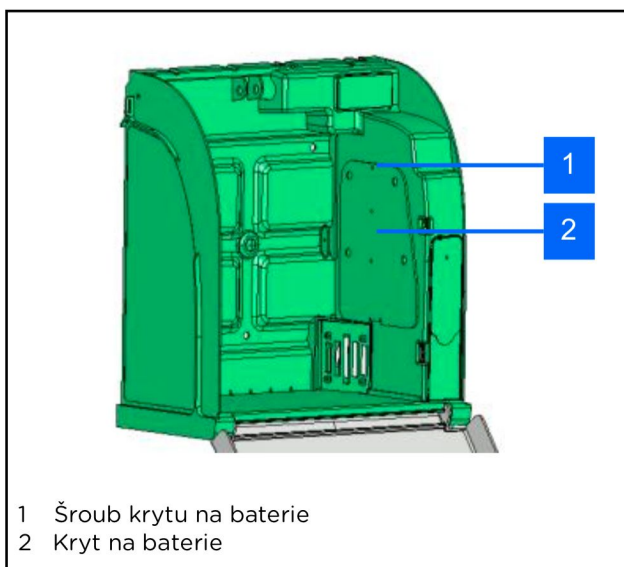


Vyjměte montážní šrouby pomocí elektrického šroubováku.


Otevřete kryt baterií a zároveň dávejte pozor na napájecí kabel.

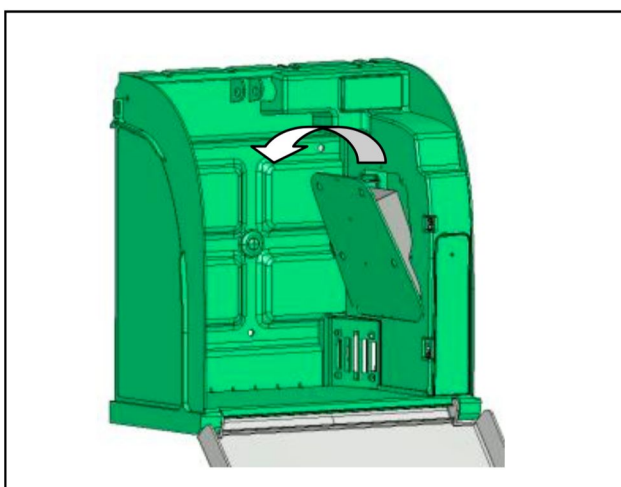


Vložte čtyři připojené D-LR20 baterie. Dodržujte vyznačenou polaritu.

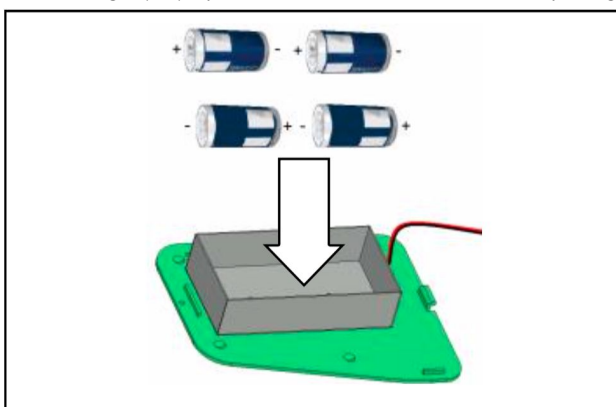

Ujistěte se, že skříňka je v provozu. Červená světla by měla blikat.

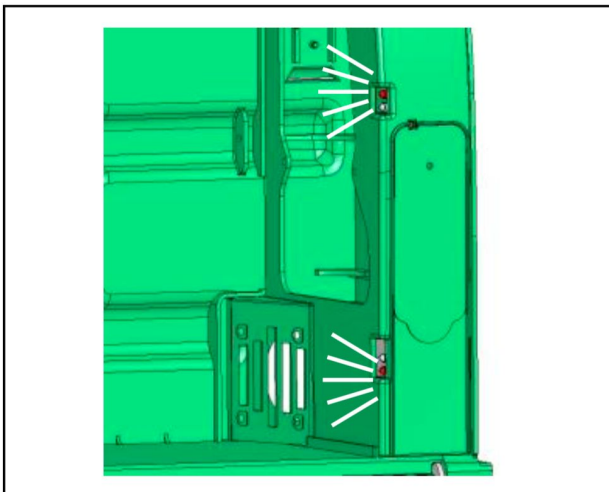


Vložte zpět baterie s krytem nejdříve spodní hranou.  
Zašroubujte zpět pomocí elektrického šroubováku.

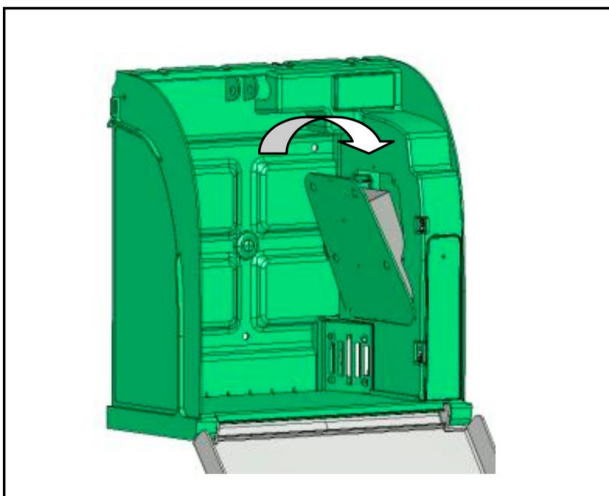

### Umístění defibrilátoru

Vsuňte defibrilátor dle obrázku a při tom přidržte popruh.

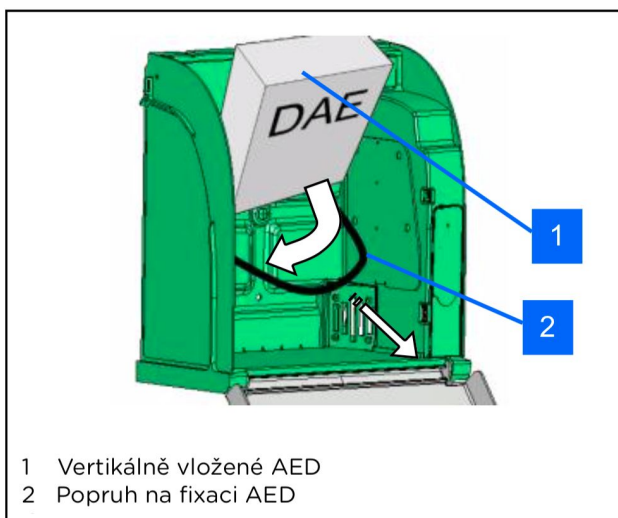

V případě pohotovosti popruh umožňuje, aby se dal defibrilátor snadno vyjmout a zároveň držel bezpečně defibrilátor na svém místě.

### Zapečetění


skříňka je dodávána se dvěma sadami pečeti.

Pečeti indikují, že skříňka byla otevřena.

Pravidelně kontrolujte stav pečeti.


### Aplikace pečeti

Pevně uzavřete skříňku. Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovřené.

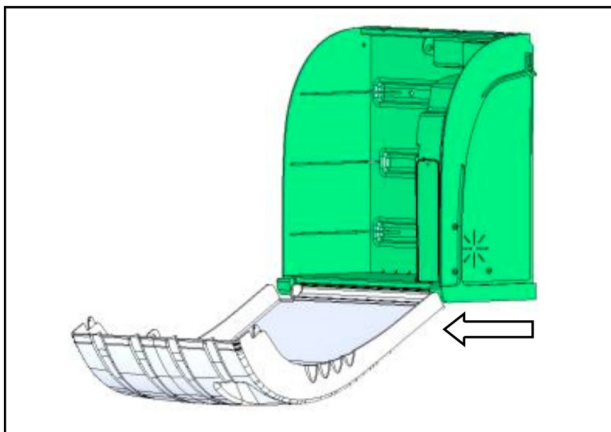


Povrch skříňky musí být čistý, suchý a odmaštěný.




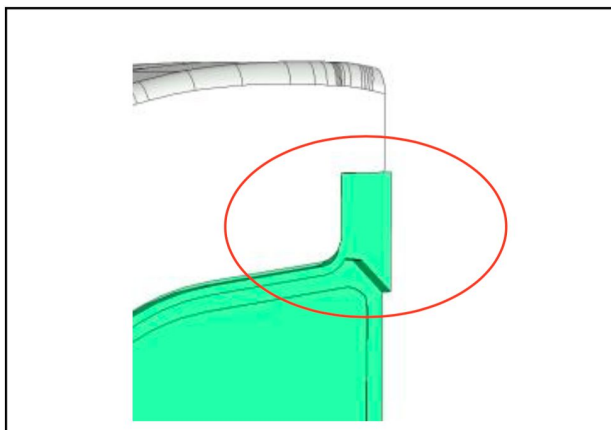

Odstraňte ochrannou fólii z pečeti.

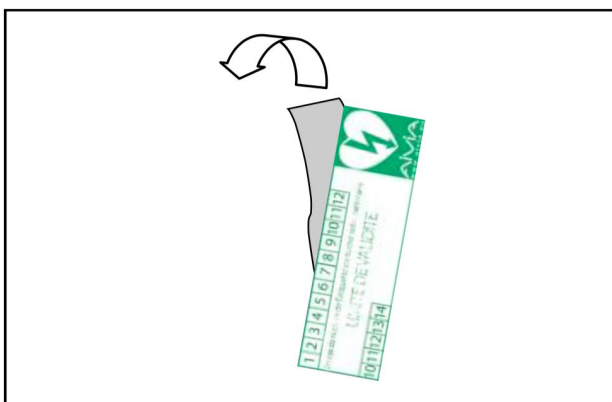


Přilepte pečeť na skříňku a dveře skříňky dle obrázku. Pečeť musí být přilepena na obou stranách skříňky.

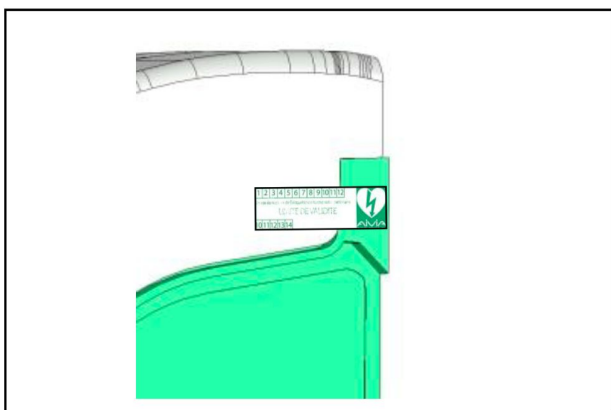

### Piktogramy

Série piktogramů vytištěná na dveřích skříňky označuje postup v případě nouze.

Ujistěte se, že jste zapsali SOS číslo permanentním popisovačem.

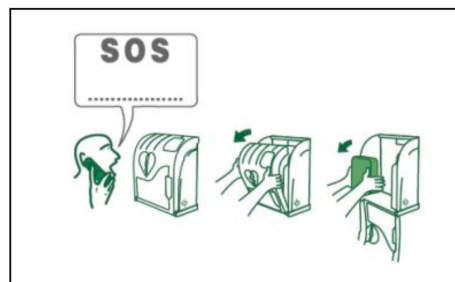

## POUŽITÍ

### Noční režim

skříňka je vybavena detektorem světla. Při nedostatku světla v okolním prostředí začne na skříňce blikat bílé světlo pro její snazší lokalizaci.

### Stav pohotovosti

Červené světlo signalizuje otevření dveří blikáním.

Pokud je skříňka vybavena zvukovým alarmem, alarm se spustí na 3 minuty po otevření.

Pro vypnutí alarmu zavřete dveře.

### Nouzové použití


V případě nehody vyžadující použití defibrilátoru zavolejte záchrannou službu.

Mluvte silným, jasným hlasem, popište situaci a určete lokaci.



**Otevřete dveře skříňky tahem k sobě.**

Začnou blikat červená světla. V případě vybavení skříňky alarmem se na 3 minuty spustí.

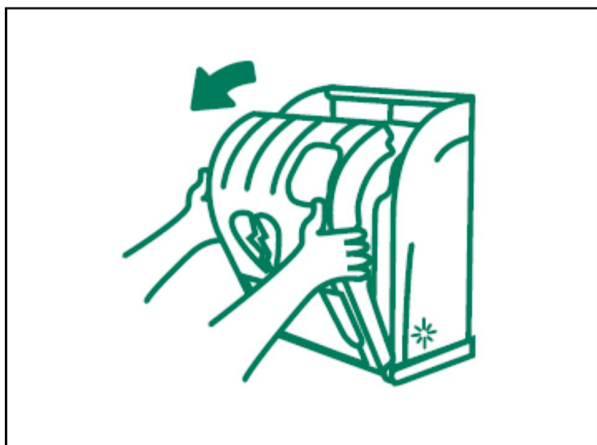

**Vyjměte defibrilátor,** jděte k postiženému a dále se řiďte instrukcemi defibrilátoru.

### Po nouzovém použití

Neumísťujte defibrilátor zpět do skříňky, aniž byste ho uvedli do aktivního stavu.

Při tomto úkonu se řiďte pokyny výrobce defibrilátoru.  
Výrobce je schopen vám s reaktivací defibrilátoru pomoci. V případě potřeby ho kontaktujte.  
Po reaktivaci umístěte defibrilátor zpět do skříňky dle instrukcí “Umístění defibrilátoru”.  
Umístěte novou pečeť dle instrukcí uvedených v sekci “Zapečetění”.

### **Údržba skříňky**

Na čištění povrchu skříňky použijte měkkou navlhčenou utěrku.

Pro otírání prachu použijte měkkou čistou a suchou utěrku. Na čištění nepoužívejte chemické produkty a čističe, mohou poškodit skříňku.

Pozor na poškození poškrábáním. Naražení skříňky na tvrdý předmět může způsobit její poškození.

Nepoužívejte jakékoli vysokotlaké čištění.

Pravidelně kontrolujte stav pečeti.

V případě porušení pečeti zkontrolujte, zda je defibrilátor kompletní a připravený k okamžitému použití.  
V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte distributora defibrilátoru.

### **Odstranění závad**

Červená světla neblinkají, i když jsou vloženy baterie:

- zkontrolujte správnou polaritu baterií
- zkontrolujte zapojení kabelů vedoucích od krytu baterií
- vyměňte baterie
- kontaktujte distributora

Při snížených světelných podmínkách nesvítí bílé světlo

- vyměňte baterie
- kontaktujte distributora


Při otevření skříňky neblinkají červená světla

- vyměňte baterie
- kontaktujte distributora

Alarm nevydává žádný zvuk při otevření skříňky

- zkontrolujte nastavení alarmu na identifikačním štítku
- vyměňte baterie
- kontaktujte distributora

## Technická specifikace

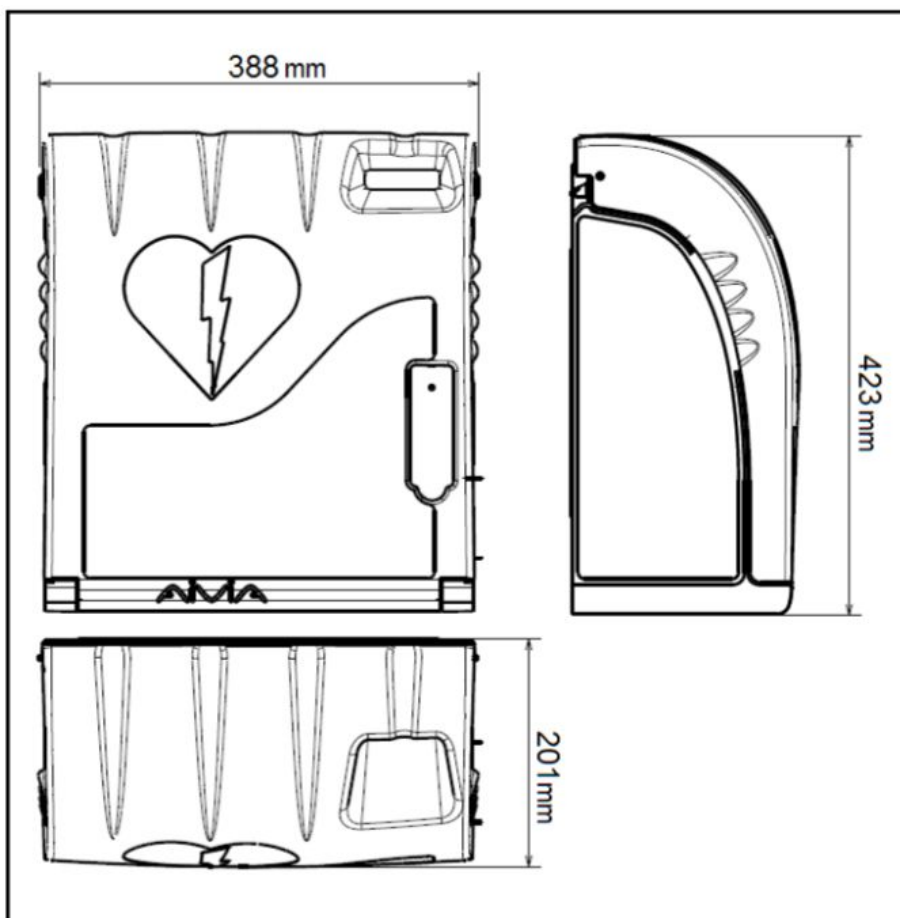

### Hmotnost baterií v balení se skříňkou

- X2A100-XX000: 3,3 kg
- X2A100-XX100 (skříňka s alarmem): 3,6 kg

### Materiál

- dveře: polykarbonát
- tělo: ABS plast
- držák: ABS plast

### Technické parametry

Zdroj napájení: 4 D-LR20 alkalické baterie, minimálně 13 Ah

Spotřeba energie

- X2A100-XX000: minimum 0,8 mA, maximum 75 mA
- X2A100-XX100 (skříňka s alarmem): minimum 0,8 mA, maximum 450 mA, hlasitost alarmu 90 dB ve vzdálenosti 1 metr

skříňka funguje samostatně po vložení baterií déle než jeden rok.

**Provozní teplota a vlhkost:**

Minimální teplota: 0°C

Maximální teplota: 40°C

Relativní vlhkost: 95 % bez kondenzace

**Maximální nosnost skříňky:** 5 kg

**Maximální nadmořská výška použití:** 2000 m.



