


NÁVOD K POUŽITÍ

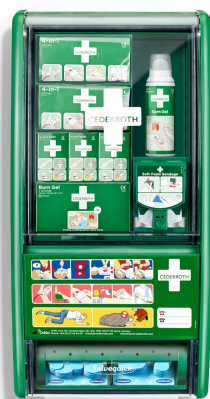

Stanice první pomoci na popáleniny Cederroth

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. **Popálenina** - popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 mini - menší zranění (CD 1911)

1. **Popálenina** - popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obklad na popáleniny Cederroth (CD 901900)

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
- vyjměte z obalu,
- přiložte na popáleninu,
- ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt,
- pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.



Gelový sprej na popáleniny Cederroth (CD 51011005)

1. Nastříkejte na celou popáleninu ve vrstvě 2 - 4 mm.
2. Chladivý efekt a úleva od bolesti nastoupí ihned.
3. Nechte působit alespoň 20 minut.

Pěnová bandáž Salvequick (CD 51011011)

1. Integrovaným řezákem odříznete potřebný kus bandáže.
2. Bandáž přilne pouze sama k sobě.
3. Obalte s ní tedy ránu tak, aby na ruce nebo jiné končetině dobře držela.

Čisticí ubrousky na poranění Salvequick (CD 323700)

Vytáhněte jeden sáček ze zásobníku ubrousků a roztrhněte ho na určeném místě. Vyměte ubrousek a očištěte ránu.

Krabice náplastí s hydrogelem na popáleniny Cederroth (CD 901903)

1. Vyměte jeden sáček s náplastí z papírové krabičky.
2. Roztrhněte na určeném místě.
3. Vyměte ze sáčku.
4. Na straně, kde je natištěno číslo jedna, sejměte za volný konec ochranný štítek.
5. Polštářek přiložte na ránu a náplast přilepte celou.
6. Sejměte ze shora ochranný štítek.

Resuscitační rouška (CD 1921)

1. Vyměte roušku ze sáčku.
2. Přiložte roušku pacientovi na obličej. Červená část dýchátka směrem dolů.
3. Zakloňte pacientovi hlavu a dýchejte do zeleného dýchátka.

Do úložného prostoru, můžete doplnit další komponenty dle vašich potřeb.

Zásobník náplastí Salvequick s detekovatelnými náplastmi Salvequick (CD 51030127) a detekovatelnými náplastmi na konečky prstů/s polštářky Salvequick (CD 51030126)

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Výměna náplně klíčem

Vložte klíč do otvorů pro klíč nad náplní a vyměte náplň.