

NÁVOD K POUŽITÍ



Střední lékárníčka Cederroth v měkkém kufru

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. **Popálenina** – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 mini - menší zranění (CD 1911)

1. **Popálenina** – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte



obvazem 4 v 1.

Ochranná sada CEDERROTH

Resuscitační rouška

1. Vyjměte roušku ze sáčku.
2. Přiložte roušku pacientovi na obličej. Červená část dýchátka směrem dolů.
3. Zakloňte pacientovi hlavu a dýchejte do zeleného dýchátka.

Rukavice

Nasaďte si rukavice na obě ruce pro ochranu sebe i pacienta.

Čisticí ubrousky

Ubrousky jsou k dezinfekci a čištění rukou i ran.

Obklad na popáleniny Cederroth

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
- vyjměte z obalu,
- přiložte na popáleninu,
- ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt,
pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.

Sterilní krytí maxi Salvequick

Odstraňte krycí štítky a přiložte na ránu.

