

# NÁVOD K POUŽITÍ



## Střední lékárnička Cederroth v měkkém kufříku

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. **Popálenina** - popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

#### Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 mini - menší zranění (CD 1911)

1. **Popálenina** - popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

### Ochranná sada CEDERROTH

#### Resuscitační rouška

1. Vyjměte roušku ze sáčku.
2. Přiložte roušku pacientovi na obličej. Červená část dýchátka směrem dolů.
3. Zakloňte pacientovi hlavu a dýchejte do zeleného dýchátka.

#### Rukavice



Nasadte si rukavice na obě ruce pro ochranu sebe i pacienta.

Čisticí ubrousky

Ubrousky jsou k dezinfekci a čištění rukou i ran.

**Obklad na popáleniny Cederroth**

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
- vyjměte z obalu,
- přiložte na popáleninu,
- ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt,  
pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.

**Sterilní krytí maxi Salvequick**

Odstraňte krycí štítky a přiložte na ránu.