

NÁVOD K POUŽITÍ



Velká lékárnička Cederroth v měkkém kufru

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. **Popálenina** – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 mini - menší zranění (CD 1911)

1. **Popálenina** – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte

obvazem 4 v 1.

Ochranná sada CEDERROTH

Resuscitační rouška

1. Vyjměte roušku ze sáčku.
2. Přiložte roušku pacientovi na obličej. Červená část dýchátka směrem dolů.
3. Zakloňte pacientovi hlavu a dýchejte do zeleného dýchátka.

Rukavice

Nasaďte si rukavice na obě ruce pro ochranu sebe i pacienta.

Čisticí ubrousky

Ubrousky jsou k dezinfekci a čištění rukou i ran.

Obklad na popáleniny Cederroth

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
 - vyjměte z obalu,
 - přiložte na popáleninu,
 - ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt,
- pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.

Pěnová bandáž CEDERROTH

1. Odstříhněte potřebné množství bandáže.
2. Bandáž přilne pouze sama k sobě.
3. Obalte s ní tedy ránu tak, aby na ruce nebo jiné končetině dobře držela.

