

NÁVOD K POUŽITÍ



Lékárnička DIN 13157 se zásobníkem náplastí Cederroth

NÁVOD K POUŽITÍ:

Zásobník náplastí

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Obvaz k zastavení krváčení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. **Popálenina** – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krváčení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krváčení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obvaz k zastavení krváčení 4 v 1 mini - menší zranění (CD 1911)



1. **Popálenina** – popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Ochranná sada CEDERROTH

Resuscitační rouška

1. Vyjměte roušku ze sáčku.
2. Přiložte roušku pacientovi na obličej. Červená část dýchátka směrem dolů.
3. Zakloňte pacientovi hlavu a dýchejte do zeleného dýchátka.

Rukavice

Nasadte si rukavice na obě ruce pro ochranu sebe i pacienta.

Čisticí ubrousky

Ubrousky jsou k dezinfekci a čištění rukou i ran.

Obklad na popáleniny Cederroth

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
 - vyjměte z obalu,
 - přiložte na popáleninu,
 - ihned nastoupí chladiivý a uklidňující efekt,
- pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.

Pěnová bandáž CEDERROTH

1. Odstříhnete potřebné množství bandáže.
2. Bandáž přilne pouze sama k sobě.
3. Obalte s ní tedy ránu tak, aby na ruce nebo jiné končetině dobře držela.

Chladicí obklad Salvequick

Chladicí obklad je aktivován přeložením sáčku. Je tak spuštěna chemická reakce a obklad začne chladit. Výrobek je určen k jednorázovému použití.

Výplach očí a ran ve spreji

Stríkejte fyziologický roztok na ránu nebo do očí ze vzdálenosti 10 – 15 cm, dokud se nevyčistí, nebo do vypotřebování obsahu (cca 5 min).



