

TECHNICKÝ LIST



Kapesní výplach očí Cederroth - CD 7221

VLASTNOSTI:

Šířka:	6,6 cm
Délka:	4,5 cm
Výška:	16,3 cm
Objem:	235 ml
Barva:	zelená
Expirace:	4 roky

POPIS VÝROBKU:

Výplach očí Cederroth obsahující sterilní, pufrovaný, fyziologický roztok. Výplach očí Cederroth je určen k mytí cizích částic a nebezpečných tekutin, jako jsou zásady nebo kyseliny, z oka v případě nouzové první pomoci. Výplach očí Cederroth má také neutralizační účinek na zásady a kyseliny. Účinek je obecně silnější u zásad než u kyselin.

VÝHODY:

- výrobek splňuje **nejvyšší světové standardy** a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu **organizace 5S**,
- Cederroth je **držitel ocenění** za produktový a komunikační design **reddot**.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

POUŽITÍ:

Výplach očí Cederroth je určen **pro první pomoc zasažení očí nebezpečnými látkami**. Výplach očí Cederroth můžete použít ihned v místě nehody, než se dostanete k oční sprše nebo jinému zdroji vody nebo vyhledáte lékařskou pomoc. Tento roztok má **účinky rychlejší než běžný roztok chloridu sodného**. Lahev snadno otevřete. Je připravena k použití otočením uzávěru odolného proti prachu. Integrovaná ergonomická oční miska pomáhá udržovat oko otevřené během vyplachování a zajišťuje vydatný průtok bez zbytečného plýtvání. Po použití již nelze lahev zavřít. Skladujte při teplotě 2 až 40 °C.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Otevřete víčko láhve.
- Přiložte k postiženému oku.
- Vyplachujte dokud je potřeba, dokud nedojde roztok nebo dokud se nedostanete k oční sprše.

V Praze dne 25. 5. 2023