

# TECHNICKÝ LIST



## Náplasti pro citlivou pokožku Salvequick - CD 6943

### VLASTNOSTI:

**Počet ks v balení:** 6 × 43 ks  
**Materiál:** plast  
**Barva:** béžová  
**Expirace:** 5 let

### POPIS VÝROBKU:

Náplasti pro citlivou pokožku Salvequick jsou klasické náplasti s polštářkem ve dvou velikostech. Užší mají velikost 7,2 x 1,9 cm a širší jsou 7,2 x 2,5 cm.

### POUŽITÍ:

Náplasti pro citlivou pokožku Salvequick ze zásobníku snadno vytáhnete jednou rukou. Jedna polovina náplasti už je odkryta, a proto náplast můžete rovnou aplikovat. Celou náplň vyměníte snadno a rychle pomocí speciálního klíče. Klíč zasunete do zámku, vyjmete starou náplň a vložíte novou. Skladujte při pokojové teplotě v původních obalech.

### DOPORUČENÍ:

**Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni**

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

### OBSAH BALENÍ:

- 27x náplasti pro citlivou pokožku Salvequick - 7,2 x 1,9 cm
- 16x náplasti pro citlivou pokožku Salvequick - 7,2 x 2,5 cm

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,



- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

V Praze dne 25. 5. 2023