

TECHNICKÝ LIST



Dlouhé plastové náplasti na prst Salvequick - CD 6096

VLASTNOSTI:

Počet ks v balení: 6 x 30 ks
Materiál: plast
Barva: béžová
Expirace: 5 let

POPIS VÝROBKU:

Dlouhé plastové náplasti na prst Salvequick jsou prodloužené náplasti s polštářkem. Díky prodloužení náplasti lépe drží na prstech.

POUŽITÍ:

Dlouhé plastové náplasti na prst Salvequick ze zásobníku snadno vytáhnete jednou rukou. Jedna polovina náplasti už je odkryta, a proto náplast můžete rovnou aplikovat. Celou náplň vyměníte snadno a rychle pomocí speciálního klíče. Klíč zasunete do zámku, vyjmete starou náplň a vložíte novou. Skladujte při pokojové teplotě v původních obalech.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

OBSAH BALENÍ:

- 30x náplasti na prst dlouhé plastové Salvequick - 12 x 2 cm

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,



- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

V Praze dne 25. 5. 2023