

# TECHNICKÝ LIST



## Textilní náplasti na koncečky prstů Salvequick - CD 6454

### VLASTNOSTI:

**Počet ks v balení:** 6 × 15 ks  
**Materiál:** textil  
**Barva:** béžová  
**Expirace:** 5 let

### POPIS VÝROBKU:

Textilní náplasti na koncečky prstů Salvequick jsou motýlkové náplasti navrženy tak, aby perfektně držely na koncečkách prstů a přitom zakryly celý horní článek prstu. Mají rozměr 8,7 x 5,6 cm.

### POUŽITÍ:

Textilní náplasti na koncečky prstů Salvequick ze zásobníku snadno vytáhnete jednou rukou. Jedna polovina náplasti už je odkryta, a proto náplast můžete rovnou aplikovat. Celou náplň vyměníte snadno a rychle pomocí speciálního klíče. Klíč zasunete do zámku, vyjmete starou náplň a vložíte novou. Skladujte při pokojové teplotě v původních obalech.

### DOPORUČENÍ:

**Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni**

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

### OBSAH BALENÍ:

- 15x náplasti textilní na koncečky prstů Salvequick - 8,7 x 5,6 cm

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,



- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

V Praze dne 25. 5. 2023