

TECHNICKÝ LIST



Modré detekovatelné náplasti běžné a na konečky prstů Salvequick - CD 51030126

VLASTNOSTI:

Počet ks v balení: 6 x 30 ks
Materiál: plast
Barva: modrá
Expirace: 5 let

POPIS VÝROBKU:

Náplasti detekovatelné na konečky prstů Salvequick jsou motýlkové náplasti navrženy tak, aby perfektně držely na konečcích prstů a přitom zakryly celý horní článek prstu. Mají rozměr 6,6 x 3,9 cm (v prostřední užší části 2,2 cm). Náplasti detekovatelné s polštářky Salvequick jsou klasické náplasti o velikosti 7,2 x 1,9 cm s polštářkem uprostřed. Modré detekovatelné náplasti běžné a na konečky prstů Salvequick jsou voděodolné. Modré detekovatelné náplasti běžné a na konečky prstů Salvequick jsou speciálně navrženy pro použití v potravinářském průmyslu. Náplasti jsou detekovatelné většinou detektorů kovů používaných v potravinářském průmyslu. Modrá barva usnadňuje viditelnost náplastí.

POUŽITÍ:

Modré detekovatelné náplasti běžné a na konečky prstů Salvequick ze zásobníku snadno vytáhnete jednou rukou. Jedna polovina náplasti už je odkryta, a proto náplast můžete rovnou aplikovat. Celou náplň vyměníte snadno a rychle pomocí speciálního klíče. Klíč zasunete do zámku, vyjmete starou náplň a vložíte novou. Skladujte při pokojové teplotě v původních obalech.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

OBSAH BALENÍ:



- 15x náplasti detekovatelné na konečky prstů Salvequick - 6,6 x 3,9 (2,2) cm
- 15x náplasti detekovatelné s polštářky Salvequick - 7,2 x 1,9 cm

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Pokud potřebujete v zásobníku vyměnit náplň za novou, stačí vložit klíč do otvorů nad náplní, vyjmout starou náplň a vložit novou.

V Praze dne 25. 5. 2023