

NÁVOD K POUŽITÍ



Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1. Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
- 2. Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na ránu a zavažte.
- 3. Popálenina** – popáleninu zchlaďte pod tekoucí vodou 20–28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
- 4. Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte podpěru a obvažte obvazem 4 v 1.