


TECHNICKÝ LIST

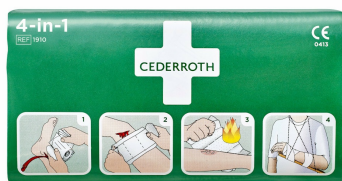

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth - CD 1910

VLASTNOSTI:

Materiál: viskóza / polyetylen
Barva: bílá
Expirace: 5 let

POPIS VÝROBKU:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth je sterilní univerzální obvaz, který se skládá ze dvou elastických obvazů a jednoho obkladu s nepřílnavou vrstvou. Obklad je přišit k jednomu z obvazů. Obvaz je zabalen do sáčku s tištěnými obrazovými pokyny první pomoci. Obvaz má rozměry 10 x 300 cm a obklad 23 x 14 cm. Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth má označení CE.

VÝHODY:

- výrobek splňuje **nejvyšší světové standardy** a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu **organizace 5S**,
- Cederroth je **držitel ocenění** za produktový a komunikační design **reddot**.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

POUŽITÍ:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth je určen pro první pomoc. Obvaz má **čtyři funkce**, a tak nahrazuje řadu tradičních obvazů a obvazů první pomoci:

1. Tlakový obvaz pro silné krvácení
2. Ochranný obvaz pro povrchové rány
3. Obvaz na popáleniny se speciální nepřílnavou vrstvou
4. Dočasný podpůrný obvaz



Obvaz je k jednorázovému použití.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. **Popálenina** - popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte podpěru a obvažte obvazem 4 v 1.

V Praze dne 25. 5. 2023