


NÁVOD K POUŽITÍ

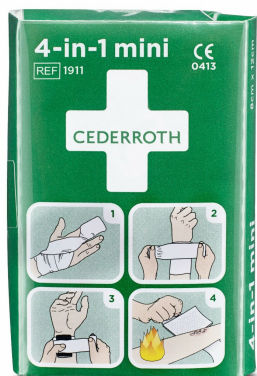

Obvaz mini k zastavení krvácení 4 v 1 Cederroth

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. **Popálenina** - popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte podpěru a obvažte obvazem 4 v 1.