

NÁVOD K POUŽITÍ



Obvaz mini k zastavení krváčení 4 v 1 Cederroth

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1.Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte podpěru a obvažte obvazem 4 v 1.
- 2.Rány bez silného krváčení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
- 3.Silné krváčení** – rozevřete obvaz 4 v 1a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
- 4.Popálenina** – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20–28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.