

NÁVOD K POUŽITÍ



Náplň pro stanici první pomoci Cederroth

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. **Popálenina** - popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 mini - menší zranění (CD 1911)

1. **Popálenina** - popáleninu zchladíte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** - rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obklad na popáleniny Cederroth (CD 901900)

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
- vyjměte z obalu,
- přiložte na popáleninu,
- ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt,
- pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.



Výplach očí a ran ve spreji Cederroth (CD 726000)

Stříkejte fyziologický roztok na ránu nebo do očí ze vzdálenosti 10 - 15 cm, dokud se nevyčistí, nebo do vypotřebování obsahu (cca 5 min).

Čistící ubrousky na poranění Salvequick (CD 323700)

Vytáhněte jeden sáček ze zásobníku ubrousků a roztrhněte ho na určeném místě. Vyjměte ubrousek a očistěte ránu.

Do úložného prostoru, můžete doplnit další komponenty dle vašich potřeb.

Zásobník náplastí Salvequick (CD 490700) včetně plastových náplastí Salvequick (CD 6036) a textilních náplastí Salvequick (CD 6444)

- Vytáhněte náplast ze zásobníku,
- nalepte u ranky,
- polštářek dejte na ranku,
- sundejte krytí druhé půlky náplasti,
- nalepte druhou půlku náplasti.

Výměna náplně klíčem

Vložte klíč do otvorů pro klíč nad náplní a vyjměte náplň.