

TECHNICKÝ LIST



Gelový sprej na popáleniny Cederroth - CD 51011005

VLASTNOSTI:

Šířka:	Ø 4,5 cm
Výška:	15,4 cm
Typ náplně:	popáleniny
Objem:	100 ml
Expirace:	3 roky

POPIS VÝROBKU:

Gelový sprej na popáleniny Cederroth je gel na vodní bázi na drobné popáleniny, opaření, spálení sluncem a poškození zářením. Působí jako dočasná ochranná bariéra, která ochlazuje a zklidňuje pokožku, a tím poskytuje úlevu od bolesti. Obsahuje konzervační látky. Gelový sprej na popáleniny Cederroth zdravotnický prostředek s označením CE, třída IIa.

VÝHODY:

- výrobek splňuje nejvyšší světové standardy a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu organizace **5S**,
- Cederroth je držitel ocenění za produktový a komunikační design **reddot**.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

POUŽITÍ:

Gelový sprej na popáleniny Cederroth naneste na postiženou oblast co nejdříve po popálení. Nepoužívejte při hlubších popáleninách druhého stupně nebo jiných typech popálenin, jako jsou chemické popáleniny, fototoxické reakce, kožní reakce vyvolané léky nebo poškození kůže způsobené elektrickým proudem. Gel je snadno aplikovatelný (gel v aerosolovém rozprašovači) a může být použit vícekrát, protože je chráněn před vzduchem až do poslední kapky. Gelový sprej na popáleniny Cederroth skladujte v suchu při pokojové teplotě a nevystavujte teplotám vyšším než 50 ° C.

DOPORUČENÍ:

Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Nastříkejte na celou popáleninu ve vrstvě 2 - 4 mm.
2. Chladivý efekt a úleva od bolesti nastoupí ihned.
3. Nechte působit alespoň 20 minut.

V Praze dne 25. 5. 2023