

# TECHNICKÝ LIST



## Náplasti na popáleniny s hydrogelem Cederroth - CD 901903

### VLASTNOSTI:

Šířka:	7,4 cm
Délka:	2 cm
Výška:	4,5 cm
Typ náplně:	popáleniny
Počet ks v balení:	10 ks
Materiál:	plast
Barva:	modrá
Expirace:	5 let

### POPIS VÝROBKU:

Náplasti na popáleniny s hydrogelem Cederroth jsou náplasti, které chrání a zklidňují drobná popálení. Tyto náplasti na popáleniny můžete také použít na drobné ranky a oděrky. Náplasti jsou modré detekovatelné, takže je můžete použít při manipulaci s potravinami. Hydrogel, kterým jsou náplasti napuštěné, nepřilne k ráně. Náplasti jsou vodotěsné a sterilní. Jedna náplast má velikost 7,4 x 4,5 cm.

### VÝHODY:

- výrobek splňuje **nejvyšší světové standardy** a má označení CE,
- součást velmi jednoduchého a komplexního systému Cederroth,
- Cederroth odpovídá normám pro metodu **organizace 5S**,
- Cederroth je **držitel ocenění** za produktový a komunikační design **reddot**.
- Od roku 2022 je zeleně zbarvený plast v této stanici vyroben z více než 85 % z recyklovaného plastu.

### POUŽITÍ:

Náplasti na popáleniny s hydrogelem Cederroth dejte na ránu. Pokud chcete, aby náplast měla chladicí efekt, před aplikací na popáleninu ji dejte do chladu na dobu nejméně 20 minut.



## DOPORUČENÍ:

### **Cederroth – první pomoc na nejvyšší úrovni**

Přečtěte si více na našem webovém [blogu](#).

## NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Vyjměte jeden sáček s náplastí z papírové krabičky.
2. Roztrhněte na určeném místě.
3. Vyjměte ze sáčku.
4. Na straně, kde je natištěno číslo jedna, sejměte za volný konec ochranný štítek.
5. Polštářek přiložte na ránu a náplast přilepte celou.
6. Sejměte ze shora ochranný štítek.

V Praze dne 25. 5. 2023