

NÁVOD K POUŽITÍ



Lékárnička na popáleniny Cederroth

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obklady s gelem na popáleniny

- Otevřete obal na vyznačeném místě,
- vyjměte z obalu,
- přiložte na popáleninu,
- ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt,
- pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.

Gelový sprej na popáleniny

1. Nastříkejte na celou popáleninu ve vrstvě 2 - 4 mm.
2. Chladivý efekt a úleva od bolesti nastoupí ihned.
3. Nechte působit alespoň 20 minut.

Obvaz k zastavení krvácení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. **Popálenina** – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. **Silné krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. **Rány bez silného krvácení** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřilnavou vrstvou obvazu přiložte na ránu a zavažte.
4. **Zlomeniny** – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Rukavice

Nasaďte si rukavice na obě ruce pro ochranu sebe i pacienta.