

NÁVOD K POUŽITÍ



Stanice první pomoci Cederroth (CD 51011026)

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obvaz k zastavení krváčení 4 v 1 - větší zranění (CD 1910)

1. Popálenina – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. Silné krváčení – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. Rány bez silného krváčení – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. Zlomeniny – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obvaz k zastavení krváčení 4 v 1 mini - menší zranění (CD 1911)

1. Popálenina – popáleninu zchladte pod tekoucí vodou 20-28°C, poté rozevřete obvaz 4 v 1 a nepřílnavou vrstvou obvazu přiložte na popáleninu a zavažte.
2. Silné krváčení – rozevřete obvaz 4 v 1 a s vloženým obvazem ponechaným na svém místě přiložte na ránu a velice pevně zavažte.
3. Rány bez silného krváčení – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, nepřílnavou vrstvou obvaz přiložte na ránu a zavažte.
4. Zlomeniny – rozevřete obvaz 4 v 1, vyjměte obvaz umístěný uvnitř, ke zranění přiložte dlahu a obvažte obvazem 4 v 1.

Obklad na popáleniny Cederroth (CD 901900)

1. Otevřete obal na vyznačeném místě.
2. vyjměte z obalu.
3. přiložte na popáleninu, ihned nastoupí chladivý a uklidňující efekt, pokud je nutné, obvažte pouze prodyšným materiálem, ale ne příliš pevně.

Výplach očí a ran ve spreji Cederroth (CD 726000)

1. Slouží k **vypláchnutí a očištění prachu a nečistot** z očí a ran.
2. Odstraňte víčko.
3. Nastříkejte na poranění, nebo otevřené oko ze vzdálenosti 10-15 cm.

Voděodolné plastové náplasti Salvequick (CD 6036)

Plastové náplasti Salvequick ze zásobníku snadno vytáhnete jednou rukou. Jedna polovina náplasti už je odkryta, a proto náplast můžete rovnou aplikovat.

Textilní náplasti Salvequick (CD 6444)

Textilní náplasti Salvequick ze zásobníku snadno vytáhnete jednou rukou. Jedna polovina náplasti už je odkryta, a proto náplast můžete rovnou aplikovat.

Ochranná sada (CD 2596)

Obsah - ubrousky pro čištění rukou s alkoholem
- ochranné rukavice na jedno použití
- resuscitační rouška s jednosměrným ventilem

1. Vyjměte roušku ze sáčku.
2. Přiložte roušku pacientovi na obličej. Červená část dýchátka směrem dolů.
3. Zakloňte pacientovi hlavu a dýchejte do zeleného dýchátka.

Pěnová bandáž Salvequick (CD 51011011)

1. Integrovaným řezákem odříznete potřebný kus bandáže.
2. Bandáž přilne pouze sama k sobě.
3. Obalte s ní tedy ránu tak, aby na ruce nebo jiné končetině dobře držela.

Úložný prostor

Obsah - pokyny pro první pomoc

- klíč pro doplňování náplní

Výměna náplně zásobníků náplastí klíčem .

Vložte klíč do otvorů pro klíč nad náplní a vyjměte náplň.

Novou náplň vložte, do zásobníku až do zacvaknutí náplně.

Zkontrolujte její uchycení v zásobníku.

Do úložného prostoru, můžete doplnit další komponenty dle vašich potřeb.

