

TECHNICKÝ LIST



Neutralizační roztok na výplach očí, 250ml - ZM 1905

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	Ø 6,3 × 20,3 cm
Hmotnost:	0,321 kg
Objem:	250 ml
Expirace:	24 měsíců
Sterilita:	ANO
Certifikát:	CE 1275

POPIS VÝROBKU:

Neutralizační roztok na výplach očí, 250ml slouží **pro výplach očí nebo oplach pokožky**. Působí velmi šetrně, neobsahuje žádné konzervační ani jiné, očnímu prostředí nepřírodní látky, obsahuje pouze fyziologické látky. Balení je sterilní. Láhev je opatřena **ergonomicky tvarovanou oční miskou** pro otevření očního víčka během vyplachovacího procesu v případě poranění očí. Výplachový roztok se tak dostane přímo na poraněné oko.

POUŽITÍ:

Neutralizační roztok se používá v případě poranění očí nebo pokožky kyselinami nebo louhy (zásadami). **250 ml roztoku vystačí na cca 2 minuty intenzivního vyplachování**. Neutrální roztok BioPhos 74 má díky vysoké pufovací aktivitě rychlý nástup neutralizačního účinku a oční tekutina se tak rychle navrácí na výchozí hodnotu pH 7,4. Je vhodný do chemických provozů, laboratoří a jiných pracovišť, kde je riziko poranění nebezpečnými chemikáliemi.

V Praze dne 25. 5. 2023