

NÁVOD K POUŽITÍ



Zdravotnická skládací nosítka

NÁVOD K POUŽITÍ:

Nosítka jsou určeny k transportu raněného a jako dočasné lůžko pro ošetření pacienta. S nosítka musí manipulovat 2 osoby (případně 4 osoby). Nosítka se nesmí používat v případě, že jsou potřísněna jakoukoliv tělní tekutinou nebo krví. Vždy je potřeba je před dalším použitím vydezinfikovat. Znečištěná nosítka se očišťují vlažnou vodou s čisticím nebo dezinfekčním prostředkem. Není vhodné je čistit rozpouštědly, jako jsou například benzín, aceton, toluen apod. Nosítka by měla být uskladněna na čistém, suchém a chladnějším místě, ne na přímém slunci.

Návod na rozložení nosítek:

1. Uchopte nosítka za madla a rozložte je v kloubovém mechanismu.
2. Položte nosítka nožkami na zem a na střed kloubového mechanismu zatlačte do úplného napnutí potahu.
3. Zraněného se snažte vždy přepravovat na střed nosítek.
4. Uchopte nosítka za madla - vždy 2 osoby (případně 4 osoby).
5. Přeneste zraněného na požadované místo.
6. Složení nosítek - otočte nosítka nožkami nahoru, na kloubový mechanismus šlápněte a pomocí madel nosítka složte.

